



Aawyx® 2003 APA

Nettoyant Désinfectant Inodore

Aawyx®2003 APA est un nettoyant désinfectant inodore prêt à l'emploi pour toutes les surfaces lavables non oxydables des établissements médicaux, hôpitaux, cliniques, industries pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires, maisons de retraite, établissements scolaires, crèches, lieux publics...

Aawyx®2003 APA est stable, inodore et non moussant et ne présente aucune nocivité pour l'homme.

Aawyx®2003 APA est recommandé pour l'entretien et la désinfection de toutes surfaces lavables : paillasse de laboratoires, surfaces médicales et dentaires, plans de travail, tables, murs, sols, mobiliers de bureaux, surfaces stratifiées, surfaces émaillées.

Efficace pour les sanitaires (lavabos, douches, baignoires, urinoirs, surfaces émaillées, robinets).

Aawyx®2003 APA est conforme aux normes européennes (EN) et françaises (AFNOR) :

Bactéricide : EN 1276 en conditions de saleté, à 20°C, à 0,8% v/v pour un temps de contact de 5mn

Fongicide : EN 1650 en conditions de saleté, à 20°C, à 80% v/v pour un temps de contact de 15mn

Sporicide : AFNOR T 72-301 à 20°C, à 90% v/v pour un temps de contact de 15mn

Virucide : AFNOR T 72-180 à 20°C, à 90% v/v pour un temps de contact de 15mn

EN 14476 en conditions de saleté à 20°C, pour un temps de contact de 60mn

Selon le protocole de la norme EN 14476 +A1, **Aawyx®2003 APA** est actif sur le virus influenza type AH1N1.

COMPOSITION et CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

BIOCIDE TP 2 Acide peracétique (CAS 79-21-0) : 0,08% P/P

Peroxyde d'hydrogène (CAS 7722-84-1) : 4,74% P/P

Aspect : liquide

Couleur : incolore

Odeur : inodore

pH à l'état pur : 3.0 ± 0.5

Densité à 20°C: 1.020 ± 0.010

Solubilité : totale dans l'eau

La composition d'**Aawyx®2003 APA** est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

Mettre la buse en position de spray. Pulvériser directement et uniformément sur la surface à entretenir et à désinfecter. Laisser agir pendant 5mn dans le cas de traitement bactéricide, 15mn dans le cas de traitement fongicide et sporicide et 60mn dans le cas de traitement virucide. Frotter si nécessaire avec une micro fibre adaptée. Lorsque le pulvérisateur est vide le recharger avec le contenu du bidon de 3L muni d'un robinet.



Aawyx® 2003 APA

Nettoyant Désinfectant Inodore

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Porter des gants de ménage. En cas de contact cutané et/ou oculaire, rincer immédiatement à l'eau.

Ne pas mélanger à d'autres produits. Ne pas exposer aux rayons du soleil. Ne pas utiliser sur les matériaux cuivreux et les métaux légers, tel que l'aluminium.

En cas de doute, il est recommandé de faire un test sur la surface à traiter. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. L'emballage, vide ou contenant encore du produit, peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.

STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE Néant.

TRANSPORT ADR/RID Non concerné.

Produit destiné à un usage professionnel. Utiliser les Biocides avec précautions

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@aawyx.com

Formule déposée au centre anti-poisons de Nancy - Tél. : 03.83.32.36.36

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

CONDITIONNEMENT

Réf : AA-2003 carton de 6 flacons de 750ml pistolet

Réf : AA-2004 carton de 4 bidons de 3L + 2 robinets

FT n°1178/ 20.10.2010