

Aawyx®

L'expert en désinfection

Aawyx® 5M-HN

Désinfectant instrumentation

Médicale et Dentaire

Concentré ou PAE

Sans Aldéhyde



Aawyx® 5M-HN est un désinfectant spécialement étudié pour la désinfection de haut niveau par trempage, du matériel médical et dentaire thermosensible.

Aawyx®5M-HN est sans aldéhyde, non corrosif à la concentration d'utilisation, non volatil, stable à plus de 40°, sans danger pour l'homme et son environnement.

Combinés aux ultrasons, Aawyx®5M-HN concentré et PE permettent le nettoyage et la désinfection du matériel. Les produits désinfectants s'utilisent sur du matériel propre, préalablement pré-désinfecté et nettoyé avec Aawyx®2090 Pré-désinfectant.

Aawyx®5M-HN concentré et PE sont les 2 versions d'une même formulation :

Aawyx®5M-HN concentré se dilue à 2%, Aawyx®5M-HN PE s'utilise sans dilution.

ACTIVITES

Bactéricide conforme normes européennes EN 1040, EN 1276, -EN 13727, Norme AFNOR NFT 72-190 actif sur Staphylococcus aureus multirésistant selon le protocole de la norme EN 1040

Fongicide EN 1275

Sporicide selon la norme AFNOR T-72301 (conditions de la norme AFNOR NF T 72-231)

Virucide actif sur VIH et VHB - Normes AFNOR NF T 72-180 -Poliovirus, Adénovirus, Herpes virus

COMPOSITION

peroxydes stabilisés, ammoniums quaternaires synergisés (chlorure de benzalkonium), huiles essentielles, terpinéol, excipients.

CARACTERISTIQUES

Liquide Incolore

Odeur : Résineux

Conservation : tenir à l'abri de la lumière à une température supérieure à 4°C

Incompatibilité : ne pas mélanger avec des produits anioniques ou chlorés

pH du produit prêt à l'emploi : $9,8 \pm 0,5$ pH du produit concentré : $9,7 \pm 0,5$

pH du produit dilué à 2% : $8,8 \pm 0,5$

Péremption : 4 ans

CONDITIONNEMENT

Réf : AA-2011 carton de 4 bidons de 5L concentré + 2 pompes

Réf : AA-2013 carton de 6 flacons de 1L doseur concentré

Réf : AA-2012 carton de 250 doses concentré de 20ml

Réf : AA-2014 carton de 4 bidons de 5L PAE (prêt à l'emploi)

FT n°1150 du 15.03.2010

Code : BG5M et BG5MPE

Aawyx® ne peut avoir connaissance des multiples applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. Aawyx® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Avant toute utilisation lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit à usage professionnel. Utiliser tous les produits et Biocides avec précautions.

Fiche de sécurité sur demande pour les professionnels.